

Link do produktu: <https://sekretnydotyk.pl/kubeczek-menstruacyjny-crushious-minerva-xs-z-woreczkiem-medyczny-silikon-18ml-p-19787.html>



Kubeczek menstruacyjny CRUSHIOUS MINERVA XS z woreczkiem, medyczny silikon, 18ml

Cena	27,70 zł
Numer katalogowy	470491517
Kod producenta	120-EX22100
Kod EAN	7403254157385

Opis produktu

Kubeczek menstruacyjny **CRUSHIOUS MINERVA XS** to zdrowa, ekonomiczna i ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych środków menstruacyjnych. Dzięki trzem dostępnym rozmiarom, **Minerva** idealnie dopasuje się do Twojego ciała, oferując komfort użycia, który docenią kobiety w każdym wieku. Po prawidłowym założeniu kubeczek staje się niewyczuwalny, a jego **zaokrąglone zakończenie** zapewnia wysoki poziom wygody, nawet podczas intensywnej aktywności fizycznej.

Wykonany z **medycznego silikonu**, kubeczek Minerva charakteryzuje się jednoczęściową konstrukcją bez szwów, co minimalizuje ryzyko dyskomfortu podczas noszenia. Działa na zasadzie delikatnej próżni, co sprawia, że jest nie tylko **łatwy w użyciu**, ale także bezpieczny. Instrukcja użytkowania dostępna jest zarówno w formie cyfrowego poradnika, jak i za pośrednictwem kodu QR umieszczonego na opakowaniu. Kubeczek można nosić nawet do **12 godzin** bez przerwy, a przy odpowiedniej pielęgnacji służy od **5 do 10 lat**.

Dbając o kubeczek Minerva, można pożegnać problem nieprzyjemnych zapachów, plam oraz dyskomfortu, a tym samym zyskać **zdrowszy i bardziej ekologiczny okres**. Poniżej przedstawiamy zalecenia dotyczące użytkowania:

- Wysterylizuj kubeczek przed pierwszym użyciem, gotując go przez 5 minut.
- Myj ręce przed i po kontakcie z kubeczkiem.
- Użyj wody lub lubrykantu na bazie wody, aby ułatwić aplikację.
- Wypróbuj różne techniki składania i wybierz najwygodniejszą.
- Sprawdź, czy kubeczek prawidłowo się zassał, delikatnie pociągając za końcówkę.
- Aby wyjąć kubeczek, usiądź wygodnie, pociągnij za końcówkę, lekko ściskając jego podstawę.
- Opróżnij zawartość i opłucz kubeczek wodą lub przetrzyj ściereczką.
- Po zakończeniu cyklu dokładnie umyj łagodnym mydłem, spłucz i wysterylizuj przez 10 minut, następnie wysusz i przechowuj w bawełnianym woreczku.

Uwaga! Nie udostępniaj swojego kubeczka **Minerva** oraz nie używaj go w przypadku występowania przeciwwskazań medycznych.

